




Importante lembrar!

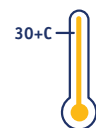

A lâmpada ficará quente após o uso; Não a use numa atmosfera rica em oxigênio ou próximo a gases inflamáveis; e certifique-se de que a lente não toca na pele do paciente (ou na sua).

Se a temperatura ambiente for superior a 30°C, aguarde um período de arrefecimento de 60 segundos antes de iniciar um segundo ciclo, caso contrário, o sistema de proteção contra sobreaquecimento pode ser ativado, terminando prematuramente o ciclo.



Mudar de um local frio para um quente e húmido pode causar condensação interna prejudicial. Certifique-se de que a lâmpada atingiu a temperatura ambiente antes de ligá-la!



Tal como acontece com outros equipamentos eletrônicos, mantenha a lâmpada em boas condições, use apenas equipamentos e acessórios autorizados e mantenha-os a pelo menos 30cm de distância de fontes fortes de emissão de rádio ou equipamentos eletrônicos sensíveis.



Evite o uso de Phovia em animais de estimação com possível fotossensibilidade, como porfiria, com hipersensibilidade cutânea ou que estejam a tomar certos medicamentos.



Entre em contato com o fabricante se tiver dúvidas sobre o desempenho do equipamento ou se este precisar de ser reparado. Não tente consertá-lo sozinho.

Por vezes, a lâmpada emite um som de “bipe”. Isso pode indicar:

- Início ou fim de um ciclo de iluminação.
- Bateria vazia.
- Início do carregamento da bateria.
- Fim do carregamento da bateria, bateria carregada!
- Aviso de sobreaquecimento



A lâmpada vem com baterias recarregáveis. O estado de carga é indicado pela luz indicador de carga:

- Verde sólido = carga total, capacidade de 25 ciclos.
- Verde intermitente = menos de 50%, capacidade para menos de 12 ciclos
- Amarelo intermitente = precisa de ser carregado, faltam menos de 4 ciclos.

Durante o carregamento, cada barra branca representa 20% da capacidade da bateria, uma luz amarela sólida significa que há capacidade suficiente para pelo menos um ciclo.



A mais recente inovação em dermatologia veterinária

*energia luminica FLE**



GUIA DE USO

*FLE = fluorescent light energy






1 *verifique*

VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES DO PHOVIA ESTÃO PRONTOS PARA USAR:

- O gel no frasco deve ser translúcido, enquanto que o gel cromóforo deve ser laranja brilhante. Certifique-se de que a ampola de gel laranja permanece na embalagem até pouco antes de usar.
- Verifique se a lâmpada está carregada: o indicador de ligado deve estar iluminado a verde ou amarelo (carga baixa mas suficiente para ser utilizado).
- Verifique se o vidro da lâmpada está limpo e desinfetado antes de usar.

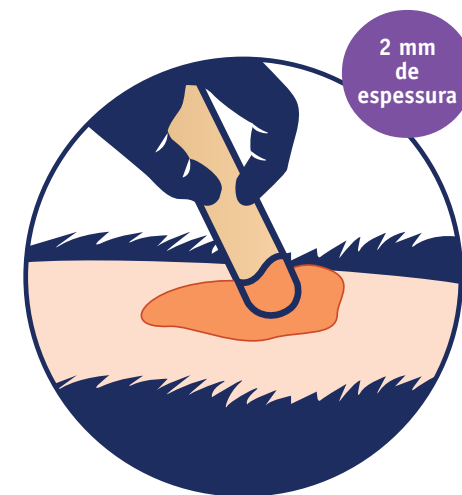


4 *o gel*

- Use a espátula para aplicar uma camada de gel de cerca de 2 mm de espessura.
- Cubra toda a área afetada até um máximo de 12 cm de diâmetro.

2 *o gel*

- Use luvas, utilize a espátula fornecida para misturar bem o gel laranja com o gel translúcido.
- Lembre-se, uma vez misturados, eles devem ser usados imediatamente e devem ficar tapados até aplicação.

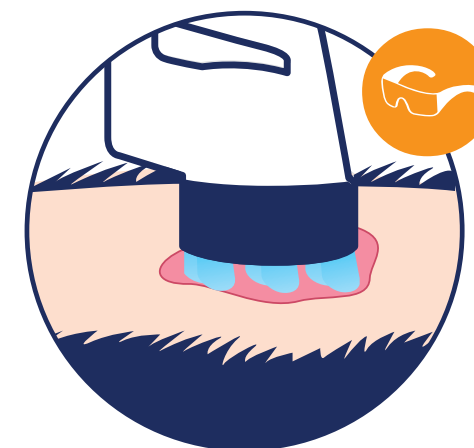

5 *comece*

INICIE A TERAPIA COM ENERGIA FLE LIGHTING*:

- Certifique-se de que todos os presentes usam os óculos protetores. Coloque o animal sem olhar para a luz ou cubra os seus olhos.
- Segure a lâmpada: o cone da lâmpada deve estar o mais próximo possível da pele sem tocar no gel.
- Pressione o botão "START / STOP" para iniciar o ciclo; ouvirá um sinal sonoro.
- O cronómetro funcionará por 2 minutos. Cada barra no "Indicador de temporizador / nível bateria" é de 24 segundos. No final, outro sinal sonoro soará e a luz desligará automaticamente.

3 *o seu animal*

- Remova os pensos e remova o pelo.
- Se for necessário, limpe a área com soro fisiológico.



6 *limpe*

- Remova suavemente o gel com gaze embebida em soro fisiológico.
- Limpe a lâmpada e guarde-a ou ponha-a a carregar.